

家庭醫療の太陽  
— 世の母様への福音 —

家庭の健康について全責任を負はれる世の母様方！  
の御手元へ完全無類の「昭和吸入器」をお贈り致します  
國民病ともいはれる呼吸器病患者の年々續出する我國に  
本器の出現たる事は全國家庭の皆様は勿論、國家社會  
の爲め大いに祝福慶幸せねばならぬ事と御座います。  
本器は家庭必需品であり、一  
臺お常備下さる事は賢明な  
現代母性の任務だと信  
じます。



攜帶用ケース  
「昭和吸入器」  
講演、演奏又は御旅  
行先の御化粧用とし  
て本品は非常に御便  
利で御好評をいたさ  
して居ります故是非  
御利用願ひ上げます。  
(定價 金八圓七拾錢)

各國に飛ぶこの快報！  
良品に國境なし！

註文殺到、製品に大量  
業界未曾有の新記録

本器は吸入器として眞に完全無類のものにして學界の諸  
權威も「これこそ世界的發明品なり」と折紙を付ける完  
成品であるだけに、  
發賣日尙淺きに不拘、内地・滿洲・支那・南米、遠くアメリカ・  
ハワイ・ジャバ・マニラ南洋及び濠洲方面よりの大量註文の殺到  
を見るにいたりました事は多年の苦心の結晶が遂に報ひられたる  
ものとして本舗の聊か誇りとする所と御座います。

本器出現によつて治病目的は完全に果された譯で御使用  
中或は御使用前、その愉快さ、便利さについては百  
萬言の説明よりもたつた一度の御實驗が最も雄辨に説明  
するもので御座います。治療方面のみならず「美が第  
一」「咽喉が第一」の俳優、聲樂家等藝術を生命とする方  
々にも本器は専ら御愛用を賜つて居ります。


部分品について

本器の材料は凡て良質定評のもの  
のみを選擇してありますが萬一御取扱  
の不注意から破損し、又は紛失した  
場合は特に左記の値段を以て部分品  
をお領けいたします。

- 1. 薬液蒸氣噴射器 二円四十五錢
- 2. 把手 瓶 十五錢
- 3. 蒸氣發生鐘 六十錢
- 4. 氣水分離瓶 六十五錢
- 5. 重 蓋 二十五錢
- 6. 金屬性焔爐 七十五錢
- 7. アルコール燈 三十五錢
- 8. ガスバーナー 一円二十錢

御使用後の納め方

御使用後は噴射器のゴム管丈を外して圖示  
の如く取まとめ其儘箱の中にお入れ下されば  
極めて簡単に仕舞ふ事が出来ます。従来の吸  
入器の様に御使用前後に何等の面倒もない點  
本品の特にすぐれた長所とされて居ります。

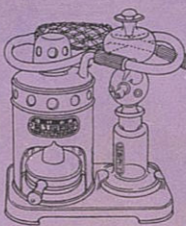

★御註文になられる場合★

本器は全國有名藥店デパートに有りますが萬  
一品切れの節は直接本舗（振替東京三三六七  
番御利用が便利です）へ御註文下さい尚ハガキ  
で御註文の場合も代金引換の便に應じます。

特許 昭和吸入器製造發賣元  
本舗 東 商 會  
東京市日本橋區室町四丁目八番地  
電話日本橋(24)三六〇四番  
振替口座東京三三六七番

專 賣 特 許  
昭 和 吸 入 器  
の 說 明 書


專賣特許 二二・二二五號  
實用新案 二二・二二八號  
實用新案 二二・二二九號  
實用新案 一九九・五五三號  
實用新案 二〇二・二二〇號  
實用新案 二〇三・二二一號  
實用新案 二〇四・二二二號  
實用新案 二〇五・二二三號  
實用新案 二〇六・二二四號  
實用新案 二〇七・二二五號  
實用新案 二〇八・二二六號  
實用新案 二〇九・二二七號  
實用新案 二一〇・二二八號  
實用新案 二一一・二二九號  
實用新案 二一二・二三〇號

1. 本器は獨創的のゴム管應用の移動式になつて  
居りますのでどんなに重患でも身體を少し  
も動かさず、どんな姿勢も極めて自由自在  
に吸入できます。

2. これまでのものは吸入中に大粒の湯滴がブ  
ック／＼飛び出すので病人や子供さんは一番  
これを嫌がつて居りました。  
本器は特別裝置の調節器の作用によつて蒸  
氣罐から出て来る強い蒸氣と湯滴が完全に  
分離され細かい霧だけが出ますので吸入時  
に熱い湯滴が飛び出すやうな事は絶対にあ  
りません、ですから子供さんも病人も心か  
ら安心して愉快に吸入ができます。

3. 本器の材料は特に、嚴撰されただけに、極め  
て清潔で衛生的しかも堅牢優美にして組立  
の要はなくそのまま直ぐ御使用出來、掃除  
なさらないでも薬、其他の爲めに器械がさ  
びるやうな事は絶対ありせません。従つて次  
に御使ひになる時も直ぐの間に合ひます。

どんな姿勢も  
自由自在！  
どんなに愉快に  
簡単に吸入できる

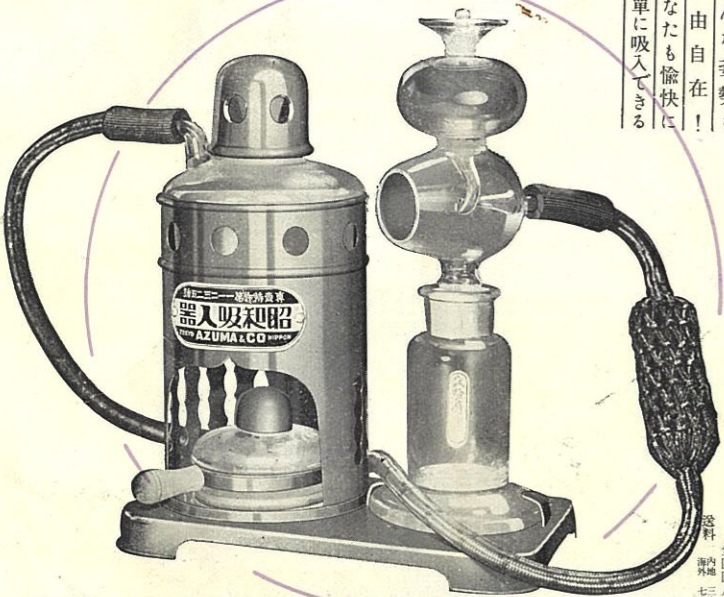

眞寫面正「器入吸和昭」品明發的界世

定價 器具一本 八圓  
金四圓八拾錢  
送料 郵料 七拾錢

健康家庭をつくる「昭和吸入器」

見よ此の三大特長

好評と絶讃の嵐……

# 専門家も驚く家寶！『昭和吸入器』のおすゝめ

吸入器は一般家庭では主として治療の方面に使用されて居りました。而も在來の吸入器では使用上、治療上、不完全の點多く可成りの不便と不安とを伴つた爲、悪性感冒流行期には非吸入の必要に迫られる時すらも尙しばしば等閑に附される状態でした。従つて吸入器の構造改善の聲は恰も燎原の火の如く強い時代の聲であり強い要求としてあつたのであります。

## 世界に誇るべき發明

所がこれまでの組立困難な、凡ての點で非難の多い吸入器とは全然その趣きを異にした昭和吸入器が發明され、どんな姿勢も自由自在に、又お子様も御婦人も御老輩も實に心地よく愉快にしかも至極簡単に吸入できるゴム管應用の世界的優良品が出来ましてより一躍吸入器界の王座を占むるに至つた次第であります。

## 昭和吸入器の特徴

一、一般御家庭に感冒、呼吸器病、眼病等の治療と豫防及び諸病の温濕布等に使用されるはもとより  
二、お顔とお肌の美を求めらるる方の美顔、美肌方面にも頗る廣範圍に亙つて應用され始めましたこれは醫學的に又美容學的にも最も理想的な尖端美容方法なりとして居ります。又近來の新傾向として咽喉を生命とする方殊に音楽家、聲樂家間に昭和吸入器は全くの守護神と重寶がられるに至りました。從



① 本器を御使用の用子氏

② 幼女が自分で吸入する



③ 山野美野院容院の中本器



④ 東京女子美術大学  
2号館4号室  
4号室  
3号室  
1号室

起きても、中書讀、もてね、もてき起すまきで入吸に單簡、に快愉もたなど、

## 昭和吸入器の榮

御申達第呈  
事入封手切錢(二)呈贈第次込申御  
本器は一般御家庭の健康への秘寶として御愛用を賜つて居ります事は申すに及ばず諸名士を初め名優市村羽左衛門丈、尾上菊五郎丈、井上正夫氏花柳章太郎氏水谷八重子、飯塚とし子、及川道子、山路ふみ子諸嬢、柳橋名妓連、聲樂家方面では松永和風氏、杵屋寒玉氏、清元延壽太夫、常盤津松尾太夫、竹本素女氏、關屋とし子氏、東海林太郎氏勝太郎さん、廣澤虎造氏等及びそれ等一流人の御社中の藝術延長のために最もすぐれた療法として應用實行され偉大なその効用に驚かないものは御座いません。  
「昭和吸入器の榮」には治病と咽喉方面では醫學博士伊藤一先生、福田房男先生、美容的立場からは斯界の權威宮澤千春博士、山野千枝子先生、及び各専門家の貴重な文獻が寫眞版入りて取まとめられ美麗なる装幀の下に極めて懇切丁寧吸入の知識を説明されて御座います故是非御一讀下さいませ。  
御日常の常識としても本誌の御熱讀は非常にお役に立つもので御座います。

御使用に際しては、

一、第一圖の様にゴム管の向きを間違はぬやう、氣水分離瓶に近きソケット

(A)を噴射器に、遠い方のソケット(B)を蒸氣發生罐に取付けます、これにて組立は終了しました。

蒸氣發生罐は、冷水より沸せば三四分て沸きますが、温湯を入れた方が早く沸きて便利です。この場合沸騰せる湯を入れて

二、氣水分離瓶は噴出する蒸氣に湯滴が混らぬ様極めて大切な役目をするものであります。最初ゴム管や分離瓶が冷えて居る爲に幾分湯がたまりますが、この場合第二圖のやうに「コップ」又は適當な器に噴射口を向け、右手でゴム管をつまんで


離しこれを二三回繰返す中に瓶中の湯は全部排出されます。

三、噴射器の藥液出口は、錆たり、腐敗したり、塵の入る様な事がありませんから、詰る事は絶対にありませんが、萬一藥液中の粒などにて、故障を生じた場合、之を掃除するには決して針金又は棒状のものを用ひず、單に


藥液室に約半分の水を入れ注入口に口を附けて連續的に四五回、吸つて下さい大概のものは夫で充分ですが如何にしても通ぜぬ固形物が、假りに詰まりても、注入口より流酸又は硝酸、二三滴をたらして、暫く放置して下さい、藥液出口に何等故障を與へず完全に掃除が出来るとは、是も本器の特長です。

一、組立は非常に容易で唯「ゴム」を接続するだけでありませぬ、お仕舞になる時も、其儘「ゴム管」をお取りになつて、容器にお入れ下さいませぬ。  
二、噴射口からは完全な、蒸氣だけが、放射されます。蒸氣と共に噴出する湯滴は、氣水分離瓶の中に全部流入するやうに考案してありますから、御使用中「ブツブツ」湯滴が飛び出たり、湯が濡れたりして、衣類疑具を汚すやうな、不愉快は絶対にありません。  
三、噴射口と蒸氣發生罐とは「ゴム」管を以て、連絡してありまして屈折が自由自在ですから、如何なる姿勢でも御使用になれます。  
四、主要部分は全部ガラス製ですから、見透しがよく清潔で、且又藥液の爲め、錆付いたり、腐蝕したりする様なことが絶対にありません。  
五、藥液室は上部に設けてありますから蒸氣が噴出し初めた時にそこへ藥液を注入して下さい。従つてその補給は極めて容易です、尙藥液室の蓋をすれば直ちに藥液の噴出が止ります。  
六、湯沸罐は強熱に耐える特殊な硬質硝子ですから最も堅牢でありまして御使用中湯の減少した場合、一時アルコールランプを消して、すぐ補給しても決して壊れる心配はありません。この場合温湯を補給する方が、勿論早く沸騰します、湯又は水の分量は罐の肩までとして上部は少しあけて置く方がよろしい。  
七、蒸氣發生罐の安全装置は二重蓋式になつて居ります、これが爲に噴射中の蒸氣の壓力は常に一定で御使用中蒸氣の漏れる心配もなく、萬一蒸氣の噴射が防げられた場合には、直にこの二重蓋から漏噴されませぬ安全であります。

(圖二第)

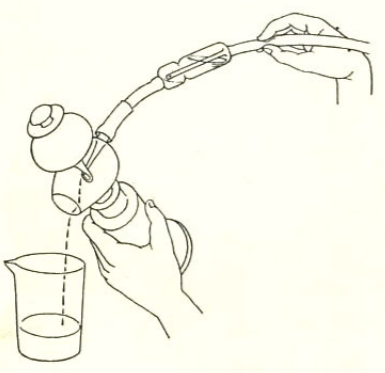

(圖一第)

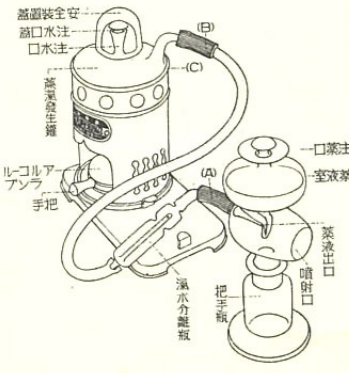

學理と實際に則した

他に類のない本器の特長