

尿中乱用薬物検査試薬 マルチタイプ DOA-10 Test Cassette

MP Biomedicals は、60年以上にわたり、信頼性の高い製品やサービスを提供しています。DOA-10 Test Cassette は、尿に含まれる薬物の代謝産物の定性的に検出するためのクロマトグラフィーによる迅速な免疫学的測定法です。



| 特長 |

- ◆ 尿を角窓に滴下し、5-10分以内に乱用薬物を検出する簡易スクリーニングキットです。
- ◆ イムノクロマト法により精製された抗体を用いる事で高感度で信頼性の高い結果が迅速に得られます。
- ◆ 保管温度：2-30℃、有効期限：製造後24カ月

カットオフ値

- AMP…1,000 ng/mL
- BAR…300 ng/mL
- BZD…300 ng/mL
- COC…300 ng/mL
- MAMP…1,000 ng/mL
- OPI …300 ng/mL
- PCP…25 ng/mL
- TCA…1,000 ng/mL
- MTD…300 ng/mL
- THC…50 ng/mL

【結果の解釈】

陽性*：5-10分以内にControl Zone (C)に一つのバンドが現れ、Test Zone (T)に着色したバンドが現れなかったら、結果は陽性と判定されます。

陰性：5-10分以内に2つの着色したバンド、すなわちControl Zone (C)とTest Zone (T)のそれぞれに着色したバンドが現れたら、結果は陰性と判定されます。

無効：5-10分以内にControl Zone (C)に着色バンドが現れない場合、検査結果は無効となります。新しいテストデバイスで再度検査を行ってください。

*本製品の陽性結果は、対象の薬物が一定の濃度以上存在する可能性を示しています。その場合、GC/MSなど特異性が高く定量性のある方法で確認試験を行ってください。

コード	製品名	梱包単位	価格
07RD718703B	DOA-10 Test Cassette	25 テスト/箱	47,500 円

表示価格には消費税は含まれていません。また、価格は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

製造元：
MP Biomedicals Germany GmbH
輸入元：
株式会社エムピーバイオジャパン
東京都中央区日本橋人形町3-7-14
E-mail：custserv.jp@mpbio.com

販売元：

安 有限会社 川尻工業

理化学技術課 官庁公共システムグループ

〒003-0835 札幌市白石区北郷5条4丁目10番13号

電話 011-875-3172 FAX 011-875-3181

詳しくはホームページで <https://www.kawajiri-kogyo.jp/>

